

Blutdruckregulierer - Inferum NBP 051

Die Elektrostimulation erfolgt durch schwachen elektrischen Strom und an der Schwelle der Wahrnehmung. Das Gerät nutzt Programme, die sich durch die Frequenz (zwischen 4 und 140 Hz), die Laufzeit und die Amplitude unterscheiden.

Durch die Auswahl des betreffenden Programms gelingt es, überflüssige Sympathikotonie, die zu Hypertonie führt, zu verringern, oder im Gegenteil, den unzureichenden Einfluss des sympathischen Nervensystems auf den Gefäßtonus, der zur Hypotonie führt, zu erhöhen.


Ergebnis

- Normalisiert den Arteriendruck
- Verbessert den Gesamtzustand
- Verbessert das emotionale Wohlbefinden
- Erhöht die Arbeitsfähigkeit
- Verringert die Dosierung von Medikamenten oder führt dazu, dass keine Medikamente notwendig sind



Hypertonie (zu hoher Blutdruck)

Bereich für die Senkung des Arteriendrucks. Befindet sich an der Innenseite des linken Unterarms.

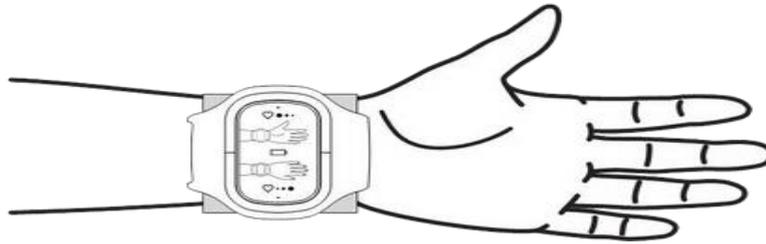


So lege ich das Inferum ABP 051 an um den Blutdruck zu senken

Die Stimulierung dieses Bereichs hat eine starke sedative Wirkung auf das Herzgefäßsystem. Das Gerät wird bei Herzgefäßerkrankungen, arterieller Hypertonie, vegetativer Dystonie der Gefäße mit Schwanken des Arteriendrucks, bei Neurosen und Schlafstörungen eingesetzt.

Die Dauer einer Sitzung ist 6 Minuten. Armbanduhr und Armschmuck am linken Arm ablegen, den Ärmel hochschieben, das Gerät befestigen und die Taste zur Normalisierung des Drucks drücken. Während der Sitzung ist es wichtig, ruhig zu sitzen oder zu liegen und sich zu entspannen. Nach dem Ende der Sitzung 20 Minuten erholen. Wir empfehlen, die Sitzung 1 – 3 x täglich über einen Zeitraum von 14 Tagen zu wiederholen.

Hypotonie (zu niedriger Blutdruck)

Bereich für die Erhöhung des Arteriendrucks. Befindet sich an der Außenseite des linken Unterarms.

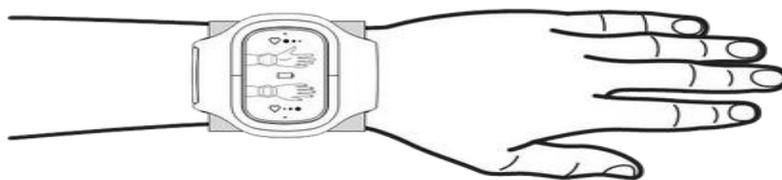

So lege ich das Inferum ABP 051 an um den Blutdruck zu erhöhen

Die Stimulierung dieses Bereichs stabilisiert den Gefäßtonus bei raschen Änderungen des atmosphärischen Drucks. Die Stimulierung des Bereichs hat einen leicht tonisierenden Effekt. Das Gerät wird bei Kopfschmerzen und vegetativer Dystonie mit Schwankungen des Arteriendrucks eingesetzt.

Die Dauer einer Sitzung ist 6 Minuten. Armbanduhr und Armschmuck am linken Arm ablegen, den Ärmel hochschieben, das Gerät befestigen und die Taste zur Normalisierung des Drucks drücken. Während der Sitzung ist es wichtig, ruhig zu sitzen oder zu liegen und sich zu entspannen. Nach dem Ende der Sitzung 20 Minuten erholen. Wir empfehlen, die Sitzung 1 – 3 x täglich über einen Zeitraum von 14 Tagen zu wiederholen